


Endoscopes FUJINON

FUJINON

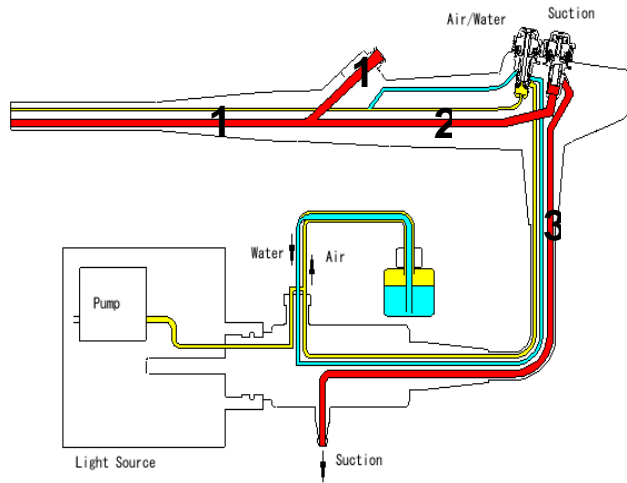

DIGESTIF			TUBE D'INTRODUCTION			POIGNEE							EXTREMITÉ DISTALE		
	type d'endoscope	série	1 - Canal opérateur			Aspiration 2 - Canal de liaison			Aspiration 3 - Tube de liaison		Air / Eau			Lavage auxillaire ou Water Jet à irriguer	Erecteur
			Entrée à goupillonner	à irriguer	à écouvillonner	Cage à goupillonner	à irriguer	à écouvillonner	à irriguer	à écouvillonner	Cage à goupillonner	à irriguer	à écouvillonner		
GASTROSCOPES	Standard	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		non	
	Double canal	X	X (1)	X (1)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	non	
	Gros canal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
COLOSCOPES	Standard	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	Pédiatrique	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	Double canal	X 2	X 2	X 2	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
DUODENOSCOPES	Groupe 8	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X(2)		
	avant 2001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X (3)	
ENTEROSCOPE	Double ballon	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
ECHO ENDOSCOPE		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			

(1) pour les modèles EG450D et EG 410 D : obligation d'utiliser un connecteur particulier CA2-ch il existe une liaison entre les 2 canaux opérateurs

(2) pour les modèles Groupe 8 : obligation d'utiliser un adaptateur particulier WA-500 + écouvillon F5RKP1020180F

(3) Intérieur de l'érecteur à irriguer

Endoscopes FUJINON

		TUBE D'INTRODUCTION			POIGNEE									EXTREMITE DISTALE
type d'endoscope	série	1 - Canal opérateur			Aspiration 2 - Canal de liaison			Aspiration 3 - Tube de liaison		Air / Eau			Lavage auxillaire ou Water Jet	Erecteur
		Entrée à goupillonner	à irriguer	à écouvillonner	Cage à goupillonner	à irriguer	à écouvillonner	à irriguer	à écouvillonner	Cage à goupillonner	à irriguer	à écouvillonner	à irriguer	
BRONCHOSCOPE		X	X	X	X	X	X	X	X (4)					

		TUBE D'INTRODUCTION			POIGNEE									EXTREMITE DISTALE
type d'endoscope	série	1 - Canal opérateur			Aspiration 2 - Canal de liaison			Aspiration 3 - Tube de liaison		Air / Eau			Lavage auxillaire ou Water Jet	Erecteur
		Entrée à goupillonner	à irriguer	à écouvillonner	Cage à goupillonner	à irriguer	à écouvillonner	à irriguer	à écouvillonner	Cage à goupillonner	à irriguer	à écouvillonner	à irriguer	
NASOFIBROSCOPE	FR													
NASOVIDEOTHERAPEUTIQUE	ER 270 T	X	X	X	X	X	X	X	X (4)					

(4) Utiliser un connecteur d'aspiration (sur la poignée)

LEGENDE

X présence et action
case vide non adapté et ou n'existe pas

Endoscopes FUJINON